

NBL FİZYOLOJİK
STERİL BURUN / GÖZ SOLÜSYONU
TEK DOZLUK FLAKON

BİLEŞİMİ:

Sodyum Klorür: 0.9 g
Saf su: y.m. 100 ml

ÖZEL KULLANIM YERİ:

Serum fizyolojik solüsyonu, bebeklerin, çocukların veya yetişkinlerin burun ve gözlerinin günlük temizliği ve bakımı için önerilmektedir.

Burun temizliği: Serum fizyolojik solüsyonu, bebeklerin genellikle mukusla tıkalı olan burunlarının yıkanmasını kolaylaştırır. Salgılardan kurtulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, nemlendirici etkisinin yardımıyla özellikle yetişkinlerin burun kuruluğunu hızlı bir şekilde giderir.

Göz Temizliği: Serum fizyolojik solüsyonu, bebeğin göz hijyeni için göze damlatılarak, göz banyosu ile veya pamuklu bir bez üzerine uygulanmasıyla kullanılabilir. Serum fizyolojik solüsyonu, çocuk veya yetişkinler için de kullanılabilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Sadece tek kullanımlıktır.
Koruyucu madde içermediklerinden, açılmış tek dozluk flakonları tekrar kullanmayınız.
Bu tıbbi cihaz herhangi bir koruyucu içermediğinden, tekrar kullanım kontamine bir çözeltinin uygulanması riskine yol açacaktır.
Aynı flakonu hem burun hem de göz temizliği ve bakımı için kullanmayınız.
Serum fizyolojik solüsyonu, herhangi bir tehlikeye neden olmaksızın, gereken sıklıkla ve uzun süreli olarak kullanılabilir.
Eğer burun veya göz için bir ilaç kullanılıyorsa, serum fizyolojik solüsyonu mutlaka bu ilacın kullanımından önce buruna ya da göze uygulanmalıdır.
Enjeksiyon ile kullanmayınız.
Oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım için tek dozluk flakonun üst kısmı döndürülüp kopartılarak açılır.

Buruna uygulama: Baş hafifçe eğik olacak şekilde burun deliğinin içine, flakon hafifçe bastırılarak uygulanır. Uygulama sonrasında bebeğin burnu nazıkçe sümkürtülmelidir.

Bebeklerde orta kulakta kontaminasyon riskini önlemek için flakona hafif bir şekilde basarak çok az bir basınçla uygulanmalıdır.

Göze uygulama: Bir parça pamuk flakonla ıslatılarak bebeğin göz kapakları nazıkçe silinir veya göze flakondan birkaç damla damlatılarak, steril bir kompres yardımıyla bebeğin göz kenarları temizlenir.

Yetişkinlerde bu ürün doğrudan göze damlatılarak yıkama ya da göz banyosu şeklinde kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

12 adet 5 ml'lik tek dozluk flakonlarda.

DAĞITICI:

NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Ümraniye 34768 İSTANBUL

ÜRETİCİ:

Laboratoire UNITHER
ESPACE INDUSTRIEL NORD
151, Rue André Durouchez
80084 AMIENS Cedex 2
FRANSA

CE İşareti Sertifika Tarihi: 25/08/2000


Kullanım Talimatı Revizyon Tarihi: Kasım 2012

Fransa'da üretilmiştir.





CE 0459

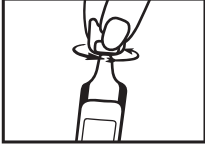

Kullanım için tek dozluk flakonun üst kısmı döndürülüp kopartılarak açılır.



Göze uygulama: Bir parça pamuk flakonla ıslatılarak bebeğin göz kapakları nazikçe silinir veya göze flakondan birkaç damla damlatılarak, steril bir kompres yardımıyla bebeğin göz kenarları temizlenir.

Yetişkinlerde bu ürün doğrudan göze damlatılarak yıkama ya da göz banyosu şeklinde kullanılabilir.



Buruna uygulama: Baş hafifçe eğik olacak şekilde burun deliğinin içine, flakon hafifçe bastırılarak uygulanır. Uygulama sonrasında bebeğin burnu nazikçe sümkürtülmelidir.

Bebeklerde orta kulakta kontaminasyon riskini önlemek için flakona hafif bir şekilde basarak çok az bir basınçla uygulanmalıdır.



STERILE A

